

大好評の検査ペンが便利にバージョンアップ!

抗原検査 + 抗体検査 が

これ一つで完結!



抗原 + 抗体検査 一体型ペン

新型コロナウイルスの存在と抗体を確認 ※1

口腔液 / 唾液を採取して 約**15分**で検出 ※2

抗原検出精度 ※3 **99.4%以上**

オミクロン株 変異株対応 ※4

- ※1 本検査キットは、判定ラインの発色を視覚的に解釈することにより、SARS-CoV-2 ウイルス抗原の検出と中和抗体の確認をします。
- ※2 検出対象物の量、検査実施環境によっては検出できない可能性があります。
- ※3 感染の有無については、専門の病院等にご相談ください。本検査キットで判断することはできません。
- ※4 医師監修のもと、メーカー PCR 検査との比較実験（陽性 50 検体：陰性 50 検体）においては、陽性陰性の結果一致率 100%。（あくまで実験結果であり、臨床的な有用性は確認できておりません。診断等に用いないでください。）
- ※5 現時点において、N501Y・L452R の変異株の検出が可能であることについては、確認しております。オミクロン株対応（理論上のみ）

※商品画像はイメージです。一部仕様変更になる場合があります。
※本製品は研究用試薬であり薬機法に基づく体外診断用医薬品の承認は受けておりません。

研究用

日本製

特許出願
特願
2021-104490

新型コロナウイルス 抗原 + 抗体検査ペン型デバイス

検査1回分 **1,680 円(税別)**

1,848 円(税込)

※100本以上ご購入で1本あたり **1,320円(税込)**

■キット内容物

試験紙付き唾液コレクター ×1 / 抽出バッファ ×1 / 乾燥材 ×1 / 使用説明書 ×1
 <本体サイズ> (約) H150 × W21 × D21mm
 <仕様> 判定時間約 15分 保管温度：室温 (2-30℃)
 ※検出精度 > 精度 99.4% 以上※
 医師監修のもと、メーカー PCR 検査との比較実験（陽性 50 検体：陰性 50 検体）
 においては、陽性陰性の結果一致率 100%。（あくまで実験結果であり、臨床的
 な有用性は確認できておりません。診断等に用いないでください。）

販売元・お問合せ先
03-5715-2950

受付時間

9 時～ 17 時
(土日祝除く)

製品 Q&A
こちらを→
ご参照ください



株式会社 総務の窓口

抗原+抗体検査がこの一本で！

最新のオールインワン形状

検体が第三者に触れたり、外部へ飛散するリスクが極めて少ない構造です。未使用の検体が残ることなく、使用したキットはひとまとめに廃棄可能なので非常に便利です。

簡単セルフ検査 約15分でその場で判定

特殊な装置や専門知識は必要ありません。コレクターの先端を口に咥え、唾液を採取するだけ。結果は色付きのラインでわかりやすく表示されますので、誰でも

抗原検出精度 約99.4%以上

抗原検査は、ウイルスを特徴づけるたんぱく質（抗原）が体内に存在するかを検査します。試薬の精度は約 99.4%※であり、高精度で検出が可能です。

※医師監修のもと、メーカー PCR 検査との比較実験（陽性 50 検体：陰性 50 検体）においては、陽性陰性の結果一致率 100%。（あくまで実験結果であり、臨床的な有用性は確認できておりません。診断等に用いないでください。）

24時間365日、
好きな時に何処でも
抗原+抗体検査が可能な

最新型の
検査キット



株式会社 東亜産業
TOA Industry Co., Ltd. (In Japan)
特許出願 特許 2021-104490

● 抗原と抗体検査が
一つで完結!!

NEW

抗原+抗体検査
一体型検査ペン

オミクロン株対応**

COVID19
ANTIGEN+
ANTIBODY
2in1 RAPID TEST
DEVICE

新型コロナウイルスの
存在と抗体を確認**

口腔液/唾液を採取して
約15分で確認**

抗原検出精度
99.4%以上**


オミクロン株・
変異株対応**

日本製 BORDER ZERO 検査1回分 研究用

※商品画像はイメージです。
一部仕様が変更になる場合があります。

検査結果表示

抗原試験紙(青)

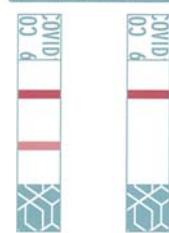

抗原陽性 抗原陰性

抗体試験紙(橙)



抗体量「少～多」

無効の場合



左図のような結果の
場合は無効となります。

検査キットの使用手順

①



口の中をコレクターで拭い、
しっかり唾液をしみこませてく
ださい。約2分間が目安です。

②



幾何学模様が抽出バッ
ファに入るまで強く押し込
んでください。

③



約15分間色付きのライ
ンが表示されるまで待
ちます。

抽出バッファ

試験紙付き唾液コレクター

販売元・お問合せ先

03-5715-2950

受付時間

9時～17時
(土日祝除く)

製品 Q&A
こちらを→
ご参照ください



株式会社 総務の窓口

いつでも、どこでも
手軽に酸素をチャージ！

酸素缶 5L

O₂ OXYGEN CAN 酸素缶
Pure Portable Oxygen

登山、ハイキング、ジョギングなど
運動、スポーツ後の酸素補給に！お仕事や勉強時などに！

POINT

1 酸素純度約 95%

POINT


2 コンパクトなのに 5L

POINT

3 安心の 日本製



使用方法

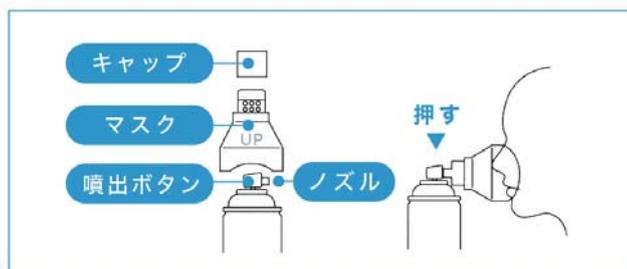

■使用回数：約 50-60 回

(約 2 秒 / 1 回※使い方によっては多少の誤差があります)

■サイズ：約φ66 mm × H263mm

■重量：約 130g

■酸素純度：約 95% 充填量：5L

日本製

1,280 円(税別)

1,408 円(税込)

ワンタッチ操作で簡単計測 血中酸素飽和度と脈拍数を測定します オキシテック

健康状態を自分でチェック
セルフチェックで自分を守る！

血中酸素飽和度

測定時間約 8 秒

脈拍数機能

単4アルカリ電池 × 2 本(別売)

カウンター機能

ストップウォッチ機能

2波長分光測定法



本製品は医療機器ではありません

2,500 円(税別)

2,750 円(税込)

■メーカー保障期間：6 ヶ月

販売元・お問合せ先

03-5715-2950

受付時間

9 時～ 17 時
(土日祝除く)

株式会社 総務の窓口